

نکات عمومی در انتقال نمونه های زیستی به آزمایشگاه

- ۱- نمونه های بافتی و سرمی پس از نمونه گیری بلافاصله در فریزر ۷۰- و ترجیحا در میکروتیوب های ۲ میلی لیتری ذخیره گردد.
- ۲- جهت انتقال نمونه ها به آزمایشگاه نسبت به رعایت زنجیره سرد شامل بسته بندی در یخدان های کائوچویی و قرار دادن تعداد مناسب کیسه های یخ Ice bag یا یخ خشک (در صورت در دسترس بودن) در مجاورت نمونه ها اقدام فرمایید. حتما درب یخدان ها با چسب پهن به طور کامل بسته شوند.
- ۳- حتما بر روی اطلاعات نمونه ها که در دیواره میکروتیوبها نوشته می شود چسب نواری شفاف چسبانده شود تا از پاک شدن اطلاعات ها در زمان ارسال به آزمایشگاه جلوگیری شود.
- ۴- قبل از ارسال نمونه به آزمایشگاه به خصوص در مورد تستهایی که باید بلافاصله پس از نمونه گیری انجام شوند، هماهنگی لازم با پذیرش آزمایشگاه انجام شود.
- ۵- توصیه می شود در مورد نمونه های بافتی در زمان نمونه گیری جهت آزمونهای مختلف بافت مورد نظر به چند بخش تقسیم و در میکروتیوب های جدا فریز شوند و از فریز و ذوب نمونه ها جدا خودداری شود.

AVINSTEMGENE

آوین بنیان ژن زیست سلامت